

# Kompresy niejałowe z gazy 5 cm x 5 cm

## APTEO

---



### Status:

Wyrób medyczny

### Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Kompresy po wyjałowieniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.

### Skład:

Kompresy z gazy 17-nitkowej, 100% bawełny.

### Opakowanie:

100 sztuk

### Sposób użycia:

Kompresów nie należy stosować w polu operacyjnym. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną wg normy EN-ISO 17665-1. W celu sterylizacji wyrób należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzić w sterylizatorach parowych w temperaturze 121 °C - czas ekspozycji 20 minut, lub w temperaturze 134 °C - czas ekspozycji 10 minut.

### Środki ostrożności:

Nie należy stosować bezpośrednio na rany

bez sterylizacji.

**Producent:**

Producent:

P.P.H. „DALPEX”

ul. Sołtysowicka 62A

51 - 168 Wrocław

[www.dalpex.pl](http://www.dalpex.pl)

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

[www.synoptispharma.pl](http://www.synoptispharma.pl)