

Gaza niejałowa 1 m² APTEO

WYRÓB
MEDYCZNY

APTEO
GAZA OPATRUNKOWA
NIEJAŁOWA



17-nitkowa



100% bawełny

UWAGA: Nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji!

Gaza po wyjąłowaniu przeznaczona jest do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.

Wyrób jednorazowego użycia!

Gazy nie należy stosować w polu operacyjnym. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną wg normy EN-ISO 17665-1. W celu sterylizacji wyrób należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzić w sterylizatorach parowych w temperaturze 121°C – czas ekspozycji 20 minut, lub w temperaturze 134°C – czas ekspozycji 10 minut.

Wytwórca:
P.P.H. „Dalpex”
ul. Sołtysowicka 62 A
51-168 Wrocław
www.dalpex.pl

Dystrybutor:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl



1 m² | 1 szt.

Status:

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Gaza po wyjąłowaniu przeznaczona jest do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.

Skład:

Gaza niejałowa 17-nitkowa, 100% bawełny.

Opakowanie:

1 sztuka

Sposób użycia:

Gaza po wyjąłowaniu przeznaczona jest do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków. Wyłącznie do użytku jednorazowego. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną według normy EN-ISO 17665-1.

Środki ostrożności:

Nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji.

Producent:

Producent:

P.P.H. „DALPEX”

ul. Sołtysowicka 62A

51 - 168 Wrocław

www.dalpex.pl

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

www.synoptispharma.pl