

- Med.-Wiss. (2x)
- Zulassung
- Vertrieb / IB
- Brand Manager
- Labor
- TR

32.2151

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------|---|--|
| URSAPHARM | | Techn. Redaktion Industriestraße 35 - Geb. E2 66129 Saarbrücken | | Tel.: +49 (0)6805 9292 175 Fax: +49 (0)6805 9292 163 | |
| Kunde: | Export - URSAPHARM PL | Lackierung: | / | | |
| Produkt: | PB HYLO-COMOD 10 ML PL (CTP) | Lackausparung: | <input type="checkbox"/> | / | |
| Art.-Nr.: | 32.2151 | Pharmacode: | 993 | | |
| Format: | 185 x 275 mm (Plano) | Zusatzspezifikation: | / | | |
| Blindenschrift (FS): | JA / NEIN | Sonstiges: | / | | |
| Material: | Offset 60 g/qm (UPM Fine, Fa. Nordland) | | | | |
| Kleber (EF): | / | Farbtoleranz vorhanden: | JA / NEIN | Nr.: FTK_UPH_ | |
| Farbe 1: | <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz (1/1-fbg.) | Farbtoleranz fertigen: | JA / NEIN | Nr.: FTK_UPH_ | |
| Farbe 2: | <input type="checkbox"/> / | (6-fache Ausfertigung) | | | |
| Farbe 3: | <input type="checkbox"/> / | Korrekturabzug Nr.: | 1 | | |
| Farbe 4: | <input type="checkbox"/> / | Erstellt: | 18.08.2017 | C. Wunsch | |
| Farbe 5: | <input type="checkbox"/> / | Freigabe Kunde: | 18.08.2017, URSAPHARM PL | | |
| Farbe 6: | <input type="checkbox"/> / | Endfreigabe/Gut zum Druck: | 24.08.2017 | C. Wunsch | |
| Farbe 7: | <input type="checkbox"/> / | | | | |

Ulotka informacyjna

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej ulotki informacyjnej, gdyż zawiera ona ważne informacje na temat prawidłowego stosowania preparatu HYLO COMOD®

HYLO COMOD®

hialuronian sodu 1 mg/ml

Poprawia nawilżenie gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego środowiska, powodującego zaburzenia typu suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu jak również po zabiegach operacyjnych przeprowadzanych na oku.

Sterylnie krople do oczu bez środka konserwującego i fosforanów.

Czym jest HYLO COMOD®

HYLO COMOD® jest sterylnym roztworem hialuronianu sodu o stężeniu 1 mg/ml.

Zawiera również bufor cytrynianowy, sorbitol, wodę.

Do czego potrzebny jest HYLO COMOD®

HYLO COMOD® poprawia nawilżenie gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego środowiska, powodującego zaburzenia typu suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu jak również po zabiegach operacyjnych przeprowadzanych na oku.

Kiedy powinno się stosować HYLO COMOD®

Jeżeli oczy swędzą, pieką, szybko się męczą, odczuwamy obecność jakby piasku pod powiekami, przyczyną może być niewystarczające nawilżenie powierzchni oka.

Przy dłuższym przebywaniu w klimatyzowanych pomieszczeniach lub intensywnej pracy przed ekranem komputera, następuje szybsze przerwanie filmu łzowego. Tymczasem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczu niezbędne jest ich ciągłe nawilżanie przez łzy.

W wyniku zabiegów operacyjnych lub zranień oczu może nastąpić zmniejszenie wydzielania łez. Prawidłowo przebiegający proces regeneracji powierzchniowych struktur oka wymaga jednak stale, wystarczającego ich nawilżania.

Dzięki stosowaniu HYLO COMOD® rogówka i spojówka oka jest długotrwale nawilżana, zaopatrywana w długo utrzymującą się odpowiednią ilość wilgoci, co powoduje, że fizjologiczne procesy gojenia mogą przebiegać optymalnie.

HYLO COMOD® zawiera hialuronian sodu, naturalną fizjologiczną substancję występującą zarówno w oku, jak i w innych częściach organizmu człowieka. Hialuronian sodu posiada szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, nawilżającego, stabilnego, trudno zmywalnego i długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu, chroniącego przed podrażnieniami i suchością.


Właściwości te są szczególnie ważne dla osób używających soczewek kontaktowych, ponieważ soczewki te są dobrze tolerowane tylko wówczas, kiedy "pływają" w wystarczającej ilości wydzielanych łez. HYLO COMOD® może być stosowany podczas używania soczewek kontaktowych.

Dzięki używaniu kropli HYLO COMOD® noszenie soczewek kontaktowych jest bardziej komfortowe, ponieważ nie tworzą się na nich osady i złogi.

HYLO COMOD® nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Nie zawiera również fosforanów, dzięki czemu unika się niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.

Jak stosować HYLO COMOD®

HYLO COMOD® należy stosować jedynie w przypadku nieuszkodzonego zamknięcia opakowania zewnętrznego (☉).

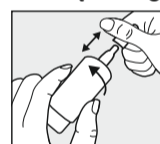


Rys: 1

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.


W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż ponad butelką. Drugą ręką wysunąć ruchem obrotowym butelkę z nakładki.

Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

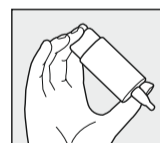


Rys: 2

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

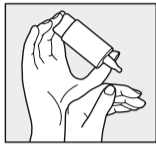


Rys: 3

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD® na drugiej ręce.

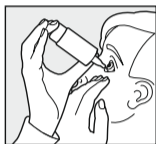

Rys: 4

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania **jednej** kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, **niezależnie od siły nacisku na denko**. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.

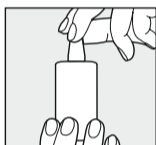

Rys: 5

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Dzięki systemowi COMOD® z butelki o pojemności 10 ml pobiera się około 300 kropli.

Po zużyciu całego opakowania, na dnie butelki pozostaje, ze względów technicznych, niewielka ilość roztworu ponad gwarantowaną pojemność 10 ml.

Długość okresu stosowania HYLO COMOD® nie jest ograniczona.

Każde opakowanie HYLO COMOD® powinno być używane tylko przez jedną osobę.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując HYLO COMOD®

W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim zakroplimy HYLO COMOD®, a powinien on być podany jako ostatni.

Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu HYLO-COMOD®

Ponieważ HYLO COMOD® nie zawiera środka konserwującego, jest szczególnie dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu.

W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach notowano reakcje nadwrażliwości takie jak: pieczenie i łzawienie oczu, które ustępowały natychmiast

po odstawieniu preparatu.

Zalecamy zakroplenie HYLO COMOD® 30 minut po założeniu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentualnych reakcji nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem HYLO COMOD®.

Dostępne dane potwierdzają możliwość stosowania kropli do oczu HYLO COMOD® także u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Jak często i jak długo powinno się stosować HYLO COMOD®

HYLO COMOD® powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty lub optyka oraz własnym odczuciem i potrzebą.

Zwykle zakrapla się 3 razy dziennie 1 kroplę HYLO COMOD® do worka spojówkowego każdego oka. Przy większych dolegliwościach HYLO COMOD® może być bez obaw zakraplany częściej.

W przypadku częstszego stosowania HYLO COMOD® (np. ponad 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. HYLO COMOD® przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednak przy dolegliwościach utrzymujących się przez długi czas (dotyczy to zresztą wszelkich schorzeń), należy zgłosić się do lekarza okulisty.

Kiedy nie należy stosować HYLO COMOD®

HYLO COMOD® nie powinien być stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Na co należy zwrócić uwagę przy przechowywaniu HYLO COMOD®

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego preparat nadaje się do użycia przez okres 6 miesięcy.

Nie używać po upływie terminu ważności (☞).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowanie:

10 ml krople do oczu

2 x 10 ml krople do oczu

Data przygotowania ulotki:

Lipiec 2017

Wytwórca (☞):

URSAPHARM, Industriestraße
66129 Saarbrücken, Niemcy

Kontakt w PL:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki

Tel: 22 732 07 90

Faks: 22 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

www.ursapharm.pl

