

# Hialeye Free 0,4%

hialuronian sodu

Sterylny, nawilżający roztwór do oczu

**BEZ KONSERWANTÓW**

**Sterylny, nawilżający roztwór do oczu z hialuronianem sodu 0,4%,  
butelka 10 ml**

## Skład

Hialuronian sodu 0,4%, wodorooortofosforan disodu dwunastowodny, diwodorooortofosforan sodu jednowodny, chlorek sodu, woda.

## Opakowanie

Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to sterylny roztwór do oczu. Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 10 ml, co odpowiada ponad 250 kroplom, z innowacyjnym i pozbawionym konserwantów opatentowanym dozownikiem do podawania wielu dawek kropli do oczu (Ophthalmic Squeeze Dispenser; OSD).

OSD zabezpiecza roztwór przed potencjalnie szkodliwymi bakteriami, dzięki czemu pozostaje on sterylny do 120 dni od pierwszego użycia.

## Co to jest Hialeye Free 0,4%?

Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to roztwór do oczu o stężeniu 0,4% zawierający hialuronian sodu o dużej masie cząsteczkowej, uzyskiwany metodą syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mukoadhezyjne i wiskoelastyczne, dzięki czemu poprawia stabilność filmu łzowego i utrzymuje komfort powierzchniowych struktur gałki ocznej poprzez ich nawilżenie, nawodnienie i ochronę.


## Kiedy stosować Hialeye Free 0,4%?

Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym hialuronianu sodu łagodzi podrażnienia, suchość, pieczenie i uczucie obecności ciała obcego w oku wywołane czynnikami środowiskowymi takimi jak wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie soczewek kontaktowych. Preparat zaleca się w przypadku: zabiegów chirurgicznych w obrębie oka, zapalenia spojówek.

## Jak stosować Hialeve Free 0,4%?

1 kropla do oka 2-3 razy na dobę, według potrzeb.

Podać do oka 1 kroplę, lekko naciskając na butelkę.

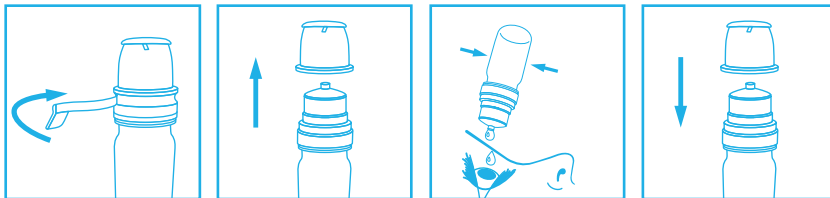

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone
- nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amonowych
- nie stosować, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu
- nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu zewnętrznym
- nie dotykać oka końcówką butelki
- odczekać co najmniej 10-15 minut przed zastosowaniem innych leków okulistycznych do stosowania zewnętrznego
- po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach może wystąpić chwilowy, niewielki brak ostrości widzenia spowodowane lepkością roztworu. W związku z tym zaleca się odczekanie kilku sekund przed wykonywaniem czynności wymagających wyraźnego widzenia.
- po zużyciu produktu nie utylizować butelki w sposób zagrażający środowisku naturalnemu
- wyrzucić zawartość po upływie 120 dni od pierwszego otwarcia
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- nie połykać
- produkt jest przeznaczony wyłącznie do oczu, do stosowania zewnętrznego
- przechowywać w temperaturze pokojowej

## Wytwórca:

NTC s.r.l.

Via Luigi Razza 3, 20124 Mediolan, Włochy

## Dystrybutor:

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149

05-152 Czosnów



Data aktualizacji: styczeń 2015 r.