

Kunde:	Export - URSAPHARM PL	Lackierung:	/
Produkt:	PB HYLO-DUAL INTENSE 10 ML ATRO COMOD PL	Lackaussparung:	<input type="checkbox"/> /
Art.-Nr.:	90.2994	Pharmacode:	1696
Format:	185 x 275 mm (Plano)	Zusatzspezifikation:	/
Blindenschrift (FS):	JA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	Offset 60 g/qm (UPM Fine, Fa. Nordland)		
Kleber (EF):	/	Farbtoleranz vorhanden:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 2:	<input type="checkbox"/> /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	<input type="checkbox"/> /		
Farbe 4:	<input type="checkbox"/> /	Korrekturabzug Nr.:	2
Farbe 5:	<input type="checkbox"/> /	Erstellt:	07.08.2019 C. Staab
Farbe 6:	<input type="checkbox"/> /	Freigabe Kunde:	
Farbe 7:	<input type="checkbox"/> /	Endfreigabe/Gut zum Druck:	

Ulotka informacyjna

Proszę zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami, umożliwi to właściwe stosowanie HYLO DUAL INTENSE®.

HYLO DUAL INTENSE®

Hialuronian sodu i ektoina

Do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego.

Powoduje to zmniejszenie zapalnych i alergicznych objawów takich jak swędzenie i pieczenie oczu.

Sterylny roztwór bez fosforanów i konserwantów.

Czym jest HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® jest sterylnym roztworem kropli ocznych bez środków konserwujących.

Skład:

1 ml HYLO DUAL INTENSE® zawiera 2 mg hialuronianu sodu, 20 mg ektoiny, kwas borowy, boraks i wodę do wstrzykiwań.

Do czego potrzebny jest HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® jest do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego. Powoduje to uwolnienie od objawów zapalnych takich jak swędzenie i pieczenie oczu.

Kiedy powinno się stosować HYLO DUAL INTENSE®?

W tych sytuacjach podwójne działanie zawartego w HYLO DUAL INTENSE® hialuronianu sodu i ektoiny niesie ze sobą szczególne korzyści.

HYLO DUAL INTENSE® składa się z soli sodowej kwasu hialuronowego, naturalnej substancji występującej w wielu organach ciała ludzkiego, w tym także w oku. Posiada ona szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, stabilnego filmu łzowego, który długo utrzymuje się na powierzchni oczu i jest odporny na wypłukiwanie. Ta tak zwana właściwość bioadhezyjna zapewnia ochronę rogówki i spojówki, a wraz z fizjologicznymi łzami pokrywa powierzchnię oka. HYLO DUAL INTENSE® zawiera większą ilość hialuronianu sodu, dzięki czemu jest bardziej lepki, a dzięki temu oko ma intensywną, kojącą i długotrwałą warstwę nawilżającą. Przewlekłe lub bardziej nasilone objawy ustępują, a oko jest chronione przed dalszym podrażnieniem.


Ektoina jest naturalną substancją uzyskaną z drobnoustrojów żyjących w ekstremalnych warunkach (np. w słonych jeziorach). Mikroorganizmy te aby przetrwać w tych niesprzyjających warunkach wytwarzają naturalną substancję zwaną ektoiną. Szczególne właściwości tej substancji zostały wykorzystane w preparacie HYLO DUAL INTENSE®. Ektoina zwiększa zdolność wiązania wody przez struktury powierzchniowe oka, tworząc na powierzchni spojówek fizjologiczną barierę. Jednocześnie stabilizuje ona rozpuszczalną w tłuszczach warstwę filmu łzowego, która zapobiega nadmiernemu wyparowywaniu łez.

Interakcja hialuronianu sodu i ektoiny zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie oczu chroniąc je jednocześnie przed nadmiernym, szczególnie szkodliwym dla nich wyparowywaniem łez.

Typowe objawy, swędzenie i pieczenie, występujące jako reakcje zapalne na podrażnienia wywołane przez środowisko, są łagodzone przez HYLO DUAL INTENSE®.

Jak stosować HYLO DUAL INTENSE®?

Krople HYLO DUAL INTENSE® można stosować tylko wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi się uszkodzenia zabezpieczenia opakowania (☉).

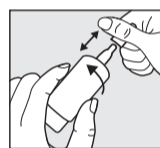


Rys. 1

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż ponad butelką. Drugą ręką wysunąć ruchem obrotowym butelkę z nakładki. Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i zdecydowanie nacisnąć kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.




Rys. 2

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

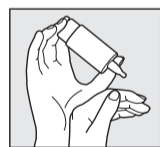


Rys. 3

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD® na drugiej ręce.

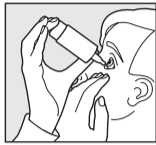

Rys. 4

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkości kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprzowanie roztworu po powierzchni oczu.

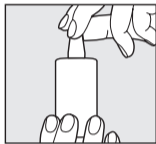

Rys. 5

Po każdorazowym użyciu butelkę należy starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Buteleczka zawiera 10 mililitrów roztworu co odpowiada około 300 kroplom. Ze względów technicznych po pobraniu gwarantowanej ilości 300 kropli pozostaje w butelce niewielka ilość roztworu.

Okres stosowania HYLO DUAL INTENSE® nie jest ograniczony.

Opakowanie przeznaczone jest zawsze dla jednej osoby, która nie powinna udostępniać go nikomu innemu.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując HYLO DUAL INTENSE®

Jeśli używasz innych kropli do oczu, między aplikacjami powinno być co najmniej 30 minut, a HYLO DUAL INTENSE® powinien być zawsze stosowany na końcu. Maści do oczu nie powinny być podawane razem z leczeniem HYLO DUAL INTENSE®.

Z uwagi na fakt, że HYLO DUAL INTENSE® nie zawiera środków konserwujących jest zwykle dobrze tolerowany nawet przy długotrwałym stosowaniu. W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie), które ustępowały po odstawieniu preparatu.

Nie ma kontrolowanych danych klinicznych na temat stosowania HYLO DUAL INTENSE® u dzieci, w czasie ciąży i laktacji. Zgodnie z istniejącą wiedzą HYLO DUAL INTENSE® może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 lat, w czasie ciąży i laktacji.

Należy pamiętać, że po podaniu HYLO DUAL INTENSE® ze względu na lepkość roztworu kropli do oczu jest możliwe tymczasowe rozmazanie obrazu. Z tego samego powodu nie należy używać HYLO DUAL INTENSE® podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Jak często i jak długo powinno stosować się HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® należy dawkować indywidualnie zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty. Zwykle podaje się dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku częstszego stosowania HYLO DUAL INTENSE® (np. częściej niż 10 razy dziennie) lub przy silniejszych dolegliwościach należy poddawać się regularnym badaniom przez lekarza okulistę.

Podczas ciąży i laktacji, a także u dzieci w wieku poniżej 12 lat, HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany częściej niż 10 razy dziennie.

HYLO DUAL INTENSE® nadaje się do długotrwałego leczenia. Jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich utrzymujących się objawów - należy skonsultować się z okulistą, jeśli twoje dolegliwości nie ustępują w przeciągu dwóch tygodni.

Kiedy nie należy stosować HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany w przypadkach występowania nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu i u dzieci poniżej 6 roku życia.

HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Na jakie wskazówki dotyczące przechowywania HYLO DUAL INTENSE® należy zwrócić uwagę?

Nie przechowywać w temperaturze powyżej

25°C (25°C).

HYLO DUAL INTENSE® może być używany przez okres 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Nie należy używać po upływie daty ważności (☞).

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowanie:

Krople do oczu w butelce o pojemności 10 ml.

Stan informacji:

Lipiec 2019

Wytwórca (☞):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Kontakt w PL:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
ul. Malarska 6
05-092 Łomianki
Tel: 22 732 07 90
Faks: 22 732 07 99
E-mail: info@ursapharm.pl
www.ursapharm.pl

Wyrób medyczny CE 0197

