

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-004452_2		
Preparat/ Product:	HELP4SKIN GOJENIE RAN		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 135 x 420 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/Text: 8 pt		
Gramatura/ Weight:	-	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	■ Black	Opracował/ Prepared by:	25.10.2019 T. Parol

Instrukcja używania

help 4 skin

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie
Flamozil®



Nie zawiera parabenów

WSPOMAGA LECZENIE RAN

WSKAZANIA

Help4Skin Gojenie ran hydrokoloidowy żel bez parabenów wskazany do miejscowej pielęgnacji suchych i wilgotnych ran. **Help4skin Gojenie ran** to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska.

Do stosowania w suchych i wilgotnych ranach, takich jak:

- Rany
- Skaleczenia
- Zadrapania
- Otarcia i pęknięcia skóry
- Powierzchnowe oparzenia

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Help4Skin Gojenie ran zawiera kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze. W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. Karnozyna buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem. Nie przywiera do rany.

SKŁAD

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

SPOSÓB UŻYCIA

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0,5-0,75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,
- założyć plaster lub bandaż,
- zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Uwaga! W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następnych punktów.

Help4Skin Gojenie ran nie jest pierwszym środkiem w przypadku oparzeń! **Natychmiast** po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą **przez 20 minut**. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody.

Help4Skin Gojenie ran należy zastosować dopiero w następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie stopnia oparzenia. **Help4Skin Gojenie ran** może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie.

Nie stosować **Help4Skin Gojenie ran** na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

- w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- w przypadku silnie zakażonych ran
- w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W takich przypadkach **Help4Skin Gojenie ran** może być pomocny, ale w żadnym wypadku nie wystarcza jako jedyny środek leczniczy.

Do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIA

Help4Skin Gojenie ran jest dostępny w formie sprayu i tuby.

Ostatnia modyfikacja treści informacyjnej: marzec 2019.

20 g e



WYTWÓRCA
OYSTERSHELL NV
NIJVERHEIDSWEG 10
9820 MERELBEKE BELGIA

DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
83-200 Starogard Gdański
ul. Pelplińska 19
Polska

CE 1639

OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:

= warunki przechowywania

= należy zapoznać się z instrukcją użycia

= uwaga!

= numer serii

= termin ważności

= wytwórca

1574/620152/19C/07020509/0

