

Kompres żelowy ciepło-zimno APTEO

CARE 10 cm x 26,5 cm



Status:

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Naturalny sposób łagodzenia bólu.

- wielokrotnego użytku
- bezpieczny, nietoksyczny żel
- zaokrąglone brzegi
- przyjemny w dotyku pokrowiec

Opakowanie:

1 sztuka

Dawkowanie:

Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Środki ostrożności:

- Tylko do użytku zewnętrznego,
- Sprawdzić szczelność przed użyciem,
- Nie stosować bezpośrednio na skórę zimnego ani ciepłego kompresu, należy użyć pokrowca lub owinać w ręcznik lub w czystą ściereczkę. Gorący okład bez użycia pokrowca może spowodować poparzenia,
- Należy stosować ostrożnie aby uniknąć urazów tkanki np. odmrożeń przy

nieprzerwanym stosowaniu zimnego

okładu powyżej 20 min,

- Stosowanie u dzieci tylko pod opieką dorosłych,

- Stosowanie przez starsze osoby z zaburzeniem krążenia kompresów zimnych tylko po konsultacji z lekarzem,

- Nie stosować na otwarte rany,

- Nie stosować podczas snu,

- Nie przekłuwać,

- Unikać silnego nacisku aby nie spowodować pęknięcia.

Pomimo że żel jest nietoksyczny, nie wkładać do ust ani nie spożywać.

Nie podgrzewać w piekarniku, na grillu lub otwartym ogniu.

Przegrzanie okładu może spowodować jego uszkodzenie.

Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Uwagi:

przed użyciem zapoznaj się z instrukcją