

Transparentne zestaw plastrów wodoodpornych APTEO



Status:

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

- superelastyczne - idealnie dopasowują się do skóry, szczelnie chroniąc ranę-
wysokochłonny opatrunek
- hipoalergiczny klej
- oddychająca, delikatna, transparentna folia

Skład:

38 mm x 38 mm x 4 szt.

76 mm x 51 mm x 4 szt.

Opakowanie:

8 sztuk

Sposób użycia:

Stosować na czystą i osuszoną skórę. Opatrunek należy zmieniać codziennie. Wyjąć plaster z papierowej saszetki, odchylić biały papier ochronny od strony opatrunku nakleić plaster na ranę, zdjąć drugi biały papier ochronny i mocno docisnąć brzegi plastra. Po przyklejeniu usunąć zabezpieczającą folię z nadrukiem od strony zewnętrznej.

Środki ostrożności:

Tylko do użytku zewnętrznego. Wyrób jednorazowego użytku. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Codziennie oczyszczać ranę i zmieniać plaster.

Producent:

Producent:

P.P.H. „DALPEX”

ul. Sołtysowicka 62A

51 - 168 Wrocław

www.dalpex.pl

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

www.synoptispharma.pl