

Zestaw plastrów wodoodpornych APTEO



Status:

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

- mikroperforacja pozwalająca skórze oddychać
- wysokochłonny opatrunek
- superelastyczne - idealnie dopasowują się do skóry, szczelnie chroniąc ranę
- hipoalergiczny klej

Skład:

72 mm x 19 mm x 8 szt.

72 mm x 25 mm x 4 szt.

Opakowanie:

12 sztuk

Sposób użycia:

Stosować na czystą i osuszoną skórę.

Opatrunek należy zmieniać codziennie.

1. Zdjąć papierek ochronny, tak aby nie dotykać opatrunku.
2. Przykleić plaster, tak aby opatrunek znajdował się bezpośrednio nad raną.
3. Upewnić się, że plaster odpowiednio przylega do skóry.

Środki ostrożności:

- Tylko do użytku zewnętrznego,

- Wyrób jednorazowego użytku,
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
- Codziennie oczyszczać ranę i zmieniać plaster.

Producent:

Producent:

Helbo Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14A

30-797 Kraków

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

www.synoptispharma.pl