

Termoфор gumowy z pokrowcem 2 l

APTEO CARE

**Status:**

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

Opakowanie:

1 sztuka

Sposób użycia:

Termoфор należy napełniać wodą do około 2/3 objętości.

Podczas napełniania trzymać termoфор w pozycji pionowej za otwór wlewowy, aby uniknąć rozpryskiwania się wody.

Usunąć nadmiar powietrza z termoформу poprzez jego ostrożne przechylenie, do czasu pojawienia się wody przy otworze wlewowym.

Zakręcić termoфор za pomocą korka na tyle mocno, aby uniemożliwić wyciekanie wody. Po użyciu odkręcić korek, wylać wodę a następnie pozostawić otwarty termoфор wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia.

Należy zachować informacje do przyszłego

wykorzystania.

Środki ostrożności:

- Sprawdzić szczelność przed użyciem,
- Nie należy używać gotującej się (wrzącej) wody do napełniania termoforu,
- Używanie ciepłej wody bezpośrednio z sieci miejskiej (centralnego ogrzewania) może spowodować skrócenie żywotności wyrobu,
- Termoфор napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia,
- Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą,
- Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej,
- Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej,
- Termoфор zawiera naturalną gumę.