

Dezaftan med

żel do stosowania w jamie ustnej
afty, pleśniawki, drobne urazy
łagodzi ból tworząc warstwę ochronną
8 g

Skład: Aqua, PVP, Propylene Glycol, Xanthan gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium sorbate, Panthenol, Sodium saccharin, Benzalkonium chloride solution, Glycyrrhetic acid, Disodium EDTA.

Wyrób medyczny Dezaftan med wytwarza na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej ochronny film. Dzięki swojemu działaniu chroni zmiany przed podrażnieniem i zapewnia ulgę w bólu. Użycie wyrobu jest wskazane w przypadku wystąpienia: aft (owrzodzeń aftowych), aftowego zapalenia jamy ustnej, pleśniawek lub drobnych zmian, w tym urazów spowodowanych przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy.

Sposób postępowania z wyrobem:

Tylko do użytku zewnętrznego.


Dorośli i dzieci: Niewielką ilość żelu (1-2 krople) nanieść punktowo na zmianę w jamie ustnej. Wyrób można nakładać za pomocą gazika lub czystego palca. Aplikację powtarzać 3-4 razy dziennie. Aby wyrób mógł wytworzyć, na powierzchni błony śluzowej, film ochronny bezpośrednio po użyciu nie należy dotykać zmiany. Nie przyjmować pokarmów i napojów przez minimum godzinę po aplikacji wyrobu.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Unikać kontaktu z oczami.

Miejsce i warunki przechowywania:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

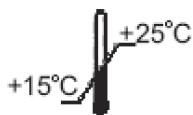

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.



AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151